

# SoundPort

Auricular con la tecnología  
Bluetooth® hecho a medida



CE  
0678

Fabricado por:  
Starkey Laboratories  
P.O. Box 9457, Minneapolis, MN 55344

Representante europeo autorizado:  
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park  
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX  
United Kingdom

Introducción . . . . . 1

Características principales . . . . . 2

Introducción a los perfiles . . . . . 4

Cargar su instrumento . . . . . 5

Operación

    Colocar y retirar . . . . . 6

    Gancho . . . . . 8

    Vincular el auricular . . . . . 9

    Contestar una llamada . . . . . 10

    Realizar una llamada . . . . . 11

Limpieza y cuidado . . . . . 12

Garantía . . . . . 13

Especificaciones . . . . . 14

Trabajar juntos . . . . . 15

Aviso de la FCC . . . . . 16

Información reguladora . . . . . 17

Por medio de la presente Starkey declara que el SoundPort cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la Directiva 1999/5/CE y 93/42/EEC.

El auricular SoundPort está diseñado para proporcionar una comunicación telefónica clara y manos libres a través de su teléfono celular con la tecnología Bluetooth®.



Cualquier teléfono celular que desee usar con el auricular SoundPort con la tecnología Bluetooth® hecho a medida, debe ser compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth® y apoyar el perfil de auricular o el de manos libres. Por favor lea este manual antes de usar su auricular SoundPort.

## Características principales



- 1 Botón de encendido: ENCENDIDO/APAGADO
- 2 Botón para hablar: contesta y termina llamadas
- 3 Botón de aumento de volumen: aumenta el volumen
- 4 Botón de disminución de volumen: disminuye el volumen
- 5 Estado LED: indica el estado de operación
- 6 Molde: adaptado a la medida de su oído por un profesional
- 7 Micrófono: micrófono con cancelación del ruido
- 8 Adaptador AC/DC: recibe el cable para cargar la pila

Los dispositivos con la tecnología Bluetooth® son diseñados típicamente para operar usando uno de los 13 “perfiles” establecidos que activan la comunicación electrónica inalámbrica. Dos de estos perfiles son comúnmente aplicados al uso de teléfonos celulares:

### **Perfil de manos libres (teléfono inalámbrico)**

Define como la tecnología Bluetooth® puede ser usado con un teléfono inalámbrico. También describe como un teléfono celular adaptado a la tecnología Bluetooth® debería cambiar a la función de teléfono inalámbrico con tecnología Bluetooth® cuando está dentro del alcance de una estación de base Bluetooth®. Esto es frecuentemente usado para permitir que los equipos manos libres se comuniquen con los teléfonos celulares en el auto.

### **Perfil de auricular**

Define como un auricular Bluetooth® debería comunicarse con los auriculares o computadoras. Este es el perfil más común, proporcionando apoyo a los populares auriculares con tecnología Bluetooth® usados con teléfonos celulares. Sus botones proporcionan controles mínimos del auricular, incluyendo la habilidad de llamar, contestar la llamada, cortar la llamada y ajustar el volumen.

El auricular SoundPort con la tecnología Bluetooth® tiene dentro una pila de polímero de ion litio recargable.

La carga proporciona 240 horas en modalidad pasiva o hasta 7 horas en uso continuo.

Antes de usar el auricular por primera vez, cargue la pila totalmente. El tiempo de carga total es alrededor de 2 horas. El auricular usa una pila de vanguardia, de polímero de ion litio recargable. La duración de la pila del auricular no está afectada por el consumo de la pila.

**Paso 1** Conectar el enchufe AC/DC al auricular.

**Paso 2** El LED rojo está encendido cuando se está cargando la pila.

**Paso 3** La carga está completa cuando el LED rojo está apagado.

<b>Tiempo de uso de la pila</b>		
	<i>Modalidad pasiva</i>	<i>Uso continuo</i>
Auricular SoundPort	240 horas	Máx. 7 horas
<b>Tiempo de carga de la pila y condición del indicador</b>		
	<i>Tiempo de carga</i>	<i>Condición del indicador</i>
Auricular SoundPort	2 horas	Cargando : rojo

### Colocar y retirar

Antes de colocar el SoundPort en el oído, conecte el auricular a su molde hecho a la medida. Para colocar, sostenga el auricular hacia el lado exterior entre sus dedos pulgar e índice. Suavemente coloque la punta del canal del molde dentro de su oído presionando el borde exterior del auricular con la yema del dedo.





Para retirar el auricular, agarre el área entre el auricular y el molde con los dedos índice y pulgar. Mientras agarre el auricular, su codo debería estar apuntando directo; gire su codo suavemente hacia adelante, así retira primero la parte de atrás del molde.

### Gancho

El uso del gancho no es necesario; sin embargo, si elige usarlo, colóquelo sobre la parte de atrás del SoundPort para que se fije a su oído derecho o izquierdo.

Con la parte de atrás del auricular frente a usted y la punta del SoundPort hacia abajo, coloque el seguro al final del gancho dentro del hueco sobre el lado izquierdo del recipiente del gancho.

Luego, suavemente jale el segundo seguro dentro del hueco sobre el lado derecho dentro del recipiente. Esto posicionará la unidad para ser usada sobre el oído izquierdo.



Invierta los seguros en el recipiente para usar la unidad en el oído derecho.

## Vincular el auricular

Su teléfono celular debe apoyar la comunicación de la tecnología Bluetooth® para poder vincularlo con el auricular SoundPort.

**Paso 1** Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO tres segundos para apagar el auricular. Espere al menos tres segundos.

**Paso 2** Presione y sostenga el botón de ENCENDIDO/APAGADO aproximadamente siete segundos hasta que el LED empiece a parpadear, alternando en verde y rojo.

**Paso 3** El auricular está ahora en modo de vinculación y puede ser detectado por un teléfono celular con la tecnología Bluetooth®.

Añada el auricular a la lista de los dispositivos en el menú de su teléfono celular; lea el manual de su teléfono celular para instrucciones de vinculación. Cuando su teléfono le solicita una CLAVE, ingrese "0000."

### Contestar una llamada

- Paso 1** Cuando recibe una llamada por el teléfono vinculado, el auricular sonará.
- Paso 2** Presione brevemente el botón de HABLAR para contestar.
- Paso 3** Presione durante unos instantes el botón de HABLAR para rechazar la llamada (el perfil de manos libres solo apoya el teléfono).

### Durante una llamada

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Cambiar el volumen      | Presione vol + ó -                                 |
| Desactivar el micrófono | Presione brevemente el botón de ENCENDIDO/ APAGADO |
| Activar el micrófono    | Presione brevemente el botón de ENCENDIDO/ APAGADO |
| Terminar una llamada    | Presione brevemente el botón de hablar             |

### Realizar una llamada

El auricular no tiene un teclado, así que es necesario discar el número en su teléfono celular o usar el modo de “discado por voz” para hacer llamadas. Para usar el “discado por voz”, tiene que grabar o escribir “etiquetas” para la lista de contactos en su teléfono celular. Refiérase al manual de su teléfono celular para instrucciones para añadir “etiquetas”. Una vez que éstas sean grabadas en su teléfono celular, use las siguientes instrucciones para hacer una llamada:

- Paso 1** Grabe o escriba una “etiqueta” en el teléfono (vea el manual del teléfono para detalles)
- Paso 2** Presione brevemente el botón de HABLAR
- Paso 3** Espere un tono breve, y diga el nombre de la persona con la cual desea hablar

### Limpeza y cuidado

Es importante limpiar su molde frecuentemente usando una toalla húmeda y periódicamente lavar el molde con agua tibia y jabón. Antes de limpiar o lavar el molde asegúrese de separar el instrumento del molde. Mantenga el instrumento lejos del agua y la humedad. Nunca use solventes, aceites, o detergentes para limpiar su instrumento o molde.

Es buena idea realizar toda la limpieza sobre una toalla suave sobre un escritorio o mesa. Esto previene cualquier daño al molde si se cae al limpiar. Es también importante mantener su molde lejos del alcance de los niños y las mascotas.

Usted puede llegar a sentirse tan cómodo con su molde que hasta se puede olvidar que lo trae puesto. Es importante crear el hábito de revisarse los oídos antes de nadar, bañarse, o aplicar productos en aerosol al pelo. En caso de que su molde o dispositivo se moje, no trate de secarlo metiéndolo al horno, al microondas o con una secadora de pelo. El calor intenso puede dañarlo. Simplemente colóquelo sobre una toalla en un lugar seguro y seco hasta que se seque.

Gracias por seleccionar este producto Starkey. El período de garantía empieza el día de su compra. Por lo tanto, le recomendamos mantener este certificado con la prueba de la fecha de compra para recibir una cobertura total por su garantía.

### Detalles de garantía

1. El período de garantía es de un año desde la fecha de compra (solo por defectos de material y fabricación).
2. Para las siguientes causas, una garantía limitada será aplicada con un cargo de servicio:
  - a. Daño por accidente, mal uso o uso indebido;
  - b. Daño por desastre natural;
  - c. Daño por uso de fuente de energía equivocada;
  - d. Daño por mala conexión.
3. Nosotros mantenemos en inventario partes de nuestros modelos por tres años; este período de tres años empieza desde la fecha de discontinuación de cada modelo

### **Auricular SoundPort con la tecnología Bluetooth® hecho a medida**

Especificación Bluetooth® . . . . .	Cumple con V1.1
Frecuencia de operación. . . . .	2.4 ~ 2.4835 GHz (banda ISM)
Distancia de operación	10 metros / 33 pies (clase 2)
Tiempo de operación. . . . .	7 horas de uso continuo
Tiempo en modalidad pasiva . . . . .	240 horas
Tiempo de carga . . . . .	2 horas
Temperatura de operación . . . . .	-20° C ~ 70° C
Humedad de operación. . . . .	5% ~ 95% RH
Peso . . . . .	18 gramos

El auricular SoundPort con la tecnología Bluetooth® hecho a medida es una herramienta de alta tecnología diseñado para ayudarlo a realizar una comunicación inalámbrica, manos libres, con su teléfono celular. Un profesional de la audición ha proporcionado un molde hecho a la medida para el uso con el auricular.

Preguntas acerca de su molde, el auricular o acerca del cuidado auditivo debería ser dirigido a ese profesional, quien está capacitado para proporcionarle todos los aspectos del cuidado auditivo.

Le recomendamos que visite a su profesional de la audición con regularidad para evaluaciones de su molde, auricular y su audición. También, si tiene amigos o miembros de su familia quienes están experimentando dificultades auditivas, anímelos a visitar la oficina de este profesional para sus necesidades del cuidado auditivo. Su audición es uno de los sentidos más vitales y no debería ser descuidado.



Este aparato cumple con la parte 15 del reglamento de FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones:

- (1) este aparato no podría causar interferencia dañina, y
- (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada

**Precaución:** Cambios o modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable por conformidad podría anular la autoridad del usuario para operar este aparato.