

# Caritas

The word "Caritas" is written in a large, black, sans-serif font. Below the letters, a thick black curved line forms a wide smile, making the word itself look like a happy face. The background is a light yellow color with a repeating pattern of small, faint smiley faces.

## **Manejo y Uso**

Para prevenir la ingestión accidental de Caritas, manténgalas lejos del alcance de niños pequeños. Nunca ponga Caritas en la boca por ninguna razón, porque podría correr el riesgo de atragantarse.

Una irritación menor y/o inflamación podría ocurrir hasta que el oído se acostumbre al instrumento retroauricular (BTE) con Caritas. Si la irritación persiste, o una reacción alérgica ocurre, discontinúe su uso.

Para limpiar y almacenar Caritas, siga las instrucciones del manual de operación del instrumento auditivo. Si se quiebra o rompe, discontinúe su uso inmediatamente y devuelva el instrumento a su profesional de la audición. Deseche Caritas en un recipiente de basura o reciclaje apropiado.

## **Starkey Laboratories**

P.O. Box 9457 • Mpls., MN USA 55440



## **Contacto Europeo Autorizado::**

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park  
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX,  
United Kingdom



## 1. Adjuntar Caritas:

Alinear el fondo de Caritas con el compartimiento de pila del instrumento, girando Caritas sobre la parte de atrás del instrumento hasta que encaje dentro del lugar detrás del codo.



## 2. Remover Caritas:

Inserte una uña o destornillador entre Caritas y el instrumento detrás del codo. Suavemente tire hacia atrás hasta que Caritas se desconecte del instrumento.

